

IDEXXベットラボ*ステーションをソフトウェアバージョン**5.13**にアップグレードしてください

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをいくつかご紹介します。

- **IDEXX SmartService*ソリューション**：
 - SmartServiceがオフライン時のトラブルシューティングに関するワークフローが改善されました（SmartServiceが3日以上オフラインの場合に、トラブルシューティングの提案を行うお知らせが表示されるようになりました）。
 - SmartServiceの設定画面のデザインを変更したことで、起動状態や接続状態などをより迅速かつ容易に確認できるようになりました。
- **IDEXX プロサイトOne*血液検査器**について：お知らせメッセージが改善されたことにより、ProCyte One機器操作画面でメッセージを終了してバーコードを手動で入力するのではなく、必要に応じてバーコードを直接手動で入力することができるようになりました。
- クラウドベースの診療情報管理ソフトウェアからのリクエストの取り扱いが改善されました。
- 翻訳およびローカライゼーションの継続的向上。
- 複数の拡張機能により安全性、信頼性、安定性を向上。

システムのアップグレード

重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

IDEXX SmartService*ソリューションでソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」をタップします。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「**機器**」、「**ソフトウェアのアップグレード**」の順にタップします。

USBドライブでソフトウェアをアップグレードするには：

1. データをバックアップします（「**機器**」をタップし、「**データ バックアップ**」をタップして、画面上の指示に従ってください）。
2. 機器操作画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップし、画面上の指示に従ってください。
3. アップグレードが完了したら、メディアラベルに記載されたソフトウェアバージョンと機器操作画面のバージョンが一致していることを確認してください。

IDEXXテクニカルサポート

0120-71-4921 音声ダイヤル1番

(動物用一般医療機器 | 血球計数装置)

© 2022 IDEXX Laboratories, Inc. 無断複写・転載を禁止します。 • 06-0003674-29

*IDEXX VetLab、ProCyte OneおよびIDEXX SmartServiceは、IDEXX Laboratories, Inc.、あるいは米国および/またはその他の各国における弊社関連会社の商標または登録商標です。

