

IDEXX ベットラボステーションバージョン5.04アップグレードのご案内

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをご紹介します：

- サンプル測定中、検査器が再起動もしくは通信が切れた場合の追加測定の操作性を改善しました。
- システムが正常にアップグレードされた後、ソフトウェアアップグレードのメッセージが表示される問題を解決しました。
- 今後の製品や機能をサポートするため、IDEXX VetLab*ステーションシステムが機能強化されました。
- 翻訳の改善。
- セキュリティー、信頼性、安定性の向上。

システムのアップグレード

重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

SmartService* ソリューション経由でソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」を押します。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「**機器操作**」をタップし、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップします。

USB ドライブ経由でソフトウェアをアップグレードするには：

1. このデータをバックアップします（「**機器操作**」を押し、「**データのバックアップ**」を押してから、画面上の指示に従います）。
2. 「**機器操作**」画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」を押してから、画面上の指示に従います。
3. アップグレードが完了したら、メディアラベルに印刷されているソフトウェアのバージョンが「**機器操作**」画面のバージョンと一致することを確認します。

IDEXXカスタマーサービス部テクニカルサポート

0120-71-4921