

# IDEXX VetLab\* Station (ベットラボ\*ス)ステーションをソフトウェアバージョン5.15にアップグレードしてください

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをいくつかご紹介します。

- 新ハードウェアに対応：IDEXXベットラボス)ステーションの新規対応ルーターとして、NETGEAR\* SXR30を追加。
- 翻訳およびローカライゼーションの継続的向上。
- 複数の拡張機能により安全性、信頼性、安定性を向上。

## システムのアップグレード

### 重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

### IDEXX SmartService\*ソリューションでソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」をタップします。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「**機器**」、「**ソフトウェアのアップグレード**」の順にタップします。

### USBドライブでソフトウェアをアップグレードするには：

1. データをバックアップします（「**機器**」をタップし、「**データ バックアップ**」をタップして、画面上の指示に従ってください）。
2. 機器操作画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップし、画面上の指示に従ってください。
3. アップグレードが完了したら、メディアラベルに記載されたソフトウェアバージョンと機器操作画面のバージョンが一致していることを確認してください。

## IDEXXテクニカルサポート

0120-71-4921 音声ダイヤル1番