

IDEXX ベットラボステーション(IDEXX VetLab* Station) をソフトウェアバージョン **6.3** にアップグレードしてください

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをいくつかご紹介します。

- 複数の拡張機能により安全性、信頼性、安定性を向上。

システムのアップグレード

重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

IDEXX スマートサービス(IDEXX SmartService*)でソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」をタップします。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

- IVLS5.22 以下のソフトウェアをご利用の方は
ホーム画面で「**機器操作**」→「**ソフトウェアのアップグレード**」の順にタップします。
- IVLS5.24 以上のソフトウェアをご利用の方は
ホーム画面で「**歯車マーク**」→「**検査機**」→「**ソフトウェアのアップグレード**」の順にタップします。

USB ドライブでソフトウェアをアップグレードするには：

1. データをバックアップします。
「**機器操作**」もしくは「**歯車マーク**」→「**検査機**」をタップし、「**データ バックアップ**」をタップして、画面上の指示に従ってください。
2. 「**機器操作**」もしくは「**歯車マーク**」→「**検査機**」の画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップし、画面上の指示に従ってください。
3. アップグレードが完了したら、外装の袋に記載されたソフトウェアバージョンと機器のバージョンが一致していることを確認してください。

IDEXX テクニカルサポート

0120-71-4921 音声ダイヤル 1 番