

2019年4月吉日

院長先生 各位

院内検査情報管理システム IDEXX ベットラボステーション 5.0バージョンへのアップグレードのご案内

謹啓

貴院ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より弊社の院内検査機器をご活用賜り心より感謝申し上げます。

ベットラボステーションのソフトウェアアップグレードについてご案内致します。今回のアップグレードにより、別紙の新機能が追加されます。新バージョンのソフトウェアは、お客様のご利用状況に合わせ、4月から5月にかけて順次、スマートサービス接続経由で配信させていただく予定です。つきましては、新バージョンへのアップグレード方法（別紙）をご参照の上、アップグレードを実施いただけますようお願い申し上げます。

*** ベットラボステーションのソフトウェアアップグレードに関するご案内は、IDEXX Japan お客様専用サイトでもご覧いただけます**

IDEXX Japan お客様専用サイト : www.idexxjp.com



*** 初期画面からテクニカルサポート画面を選択後、「お知らせ」からご高覧ください。**


敬具

アイデックス ラボラトリーズ株式会社 コンパニオンアニマル事業部 テクニカルサポート

0120-71-4921 平日 9:00-20:00 自動音声1番を | IDEXX お客様専用サイト : www.idexxjp.com
土日 9:00-18:00 お選びください

【ソフトウェアバージョンについて】

IVLS 4.80, 4.86 バージョンから IVLS 5.0 へのアップグレードです。

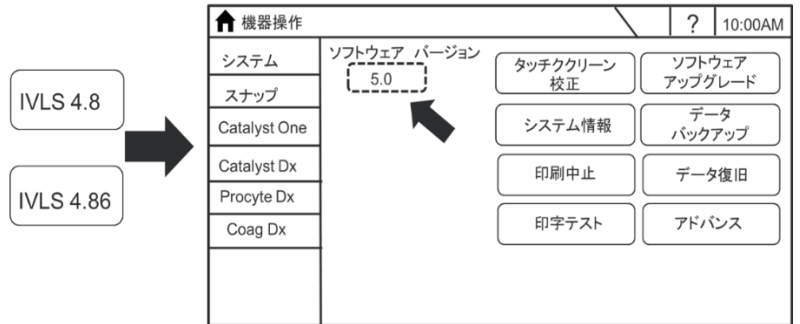

【5.0 バージョン 新機能・変更点】

- 体重の単位表示が選択可能(kg/lb)
- タッチスクリーンの反応を改善
- セキュリティーを強化
- プロサイト Dx :
血小板凝集等の血小板の異常を検知した場合、結果にアスタリスク (*) を表示
- カタリスト One :
スタンバイモードご利用時の時間表示バグを修正

スマートサービスをご利用のお客様

- ① スマートサービス接続経由でソフトウェアが自動配信されます。
- ② ベットラボステーションの画面に表示される「**今すぐ更新**」ボタンを押します。自動的に再起動とアップグレードが行われます。
* アップグレード作業前には必ずデータのバックアップを行ってください。当作業には 10 分以上必要な場合が御座います。
* 「**今すぐ更新**」しない場合、「**後で通知**」を押してください。後で更新をする際は、初期画面で「**機器操作**」を選択し、「**ソフトウェアアップグレード**」を押して画面の指示に従ってください。
- ③ 再起動後に、初期画面の「**機器操作**」を押し、ソフトウェアバージョンが 5.0 になっていることをご確認ください。

以上