

結石分析

■ 結石分析

検査価格はp.72をご覧ください。

検査項目名	検査方法	検体量	保存方法	所要日数
結石分析 *犬猫以外の検体も受付可能	赤外分光法	結石 10mg	室温	1~2

注1 結石は必ず蒸留水で洗浄後、乾燥させてから提出してください。

注2 胆石分析検査については従来通り米国での検査となります(報告日数:10~14日 動物種:犬・猫のみ)

検査説明および結果解釈

- (1)分析可能な成分は下記の通りです。下記に示した成分以外が検出された場合には同定不能となります。
- (2)尿路結石以外の検体の場合、成分比率が数値としてご報告できない場合がございます。

カルシウム系

- シュウ酸カルシウム
- リン酸カルシウム
- リン酸水素カルシウム
- 炭酸カルシウム

リン酸マグネシウムアンモニウム系

- リン酸マグネシウムアンモニウム
- リン酸水素マグネシウム
- 炭酸マグネシウム

ケイ酸系

- ケイ酸

尿酸系

- 尿酸
- 尿酸アンモニウム

シスチン系

- シスチン

タンパク系

- タンパク質

その他

- コレステロール
- デオキシコール酸
- ウルソデオキシコール酸
- ビリルビンデオキシコール酸
- 中性脂肪
- 多糖類
- キサンチン

注1 同一患者でも形状や採取部位が異なる(尿管、膀胱etc.)場合は、それぞれ別に検査料金が生じることがあります。

ご依頼時の注意点

尿路結石以外の検体(胆石・腸管結石等)のご依頼の場合、余白にその旨を明記してください。

※ご記載のない場合、ご報告日が数日遅れたり、検査が実施できない場合がございます。

- 結石を蒸留水で洗浄後、乾燥させてから提出してください。
- 以下の場合ご依頼をお受けできないことがあります。
 - 蒸留水以外の溶液で洗浄された検体
 - ホルマリンなどの溶液中に保存された検体
 - 十分に乾燥されていない検体
 - 検体量・保存輸送方法が条件にみえない場合
- 検体の返却は承っておりません。