

# 結石分析

## ■ 結石分析

検査価格はp.78をご覧ください。

| 検査項目名                 | 検査方法  | 検体量      | 保存方法 | 所要日数 |
|-----------------------|-------|----------|------|------|
| 結石分析<br>*犬猫以外の検体も受付可能 | 赤外分光法 | 結石 10 mg | 室温   | 1~2  |

注1 結石は必ず蒸留水で洗浄後、乾燥させてから提出してください。

注2 胆石分析検査については従来通り米国での検査となります(報告日数: 10~14日 動物種: 犬・猫のみ)

### 検査説明および結果解釈

- (1)分析可能な成分は下記の通りです。下記に示した成分以外が検出された場合には同定不能となります。
- (2)尿路結石以外の検体の場合、成分比率が数値としてご報告できない場合がございます。

#### カルシウム系

- シュウ酸カルシウム
- リン酸カルシウム
- リン酸水素カルシウム
- 炭酸カルシウム

#### リン酸アンモニウムマグネシウム系

- リン酸アンモニウムマグネシウム
- リン酸水素マグネシウム
- 炭酸マグネシウム

#### ケイ酸系

- ケイ酸

#### 尿酸系

- 尿酸
- 尿酸アンモニウム

#### シスチン系

- シスチン

#### タンパク系

- タンパク質

#### その他

- コレステロール
- デオキシコール酸
- ウルソデオキシコール酸
- ビリルビンデオキシコール酸
- 中性脂肪
- 多糖類
- キサントシン

注1 同一患者でも形状や採取部位が異なる(尿管, 膀胱etc.)場合は、それぞれ別に検査料金が生じることがあります。

### ご依頼時の注意点

尿路結石以外の検体(胆石・腸管結石等)のご依頼の場合、余白にその旨を明記してください。

※ご記載のない場合、ご報告日が数日遅れたり、検査が実施できない場合がございます。

- 結石を蒸留水で洗浄後、乾燥させてから提出してください。
- 以下の場合ご依頼をお受けできないことがあります。
  - 蒸留水以外の溶液で洗浄された検体
  - ホルマリンなどの溶液中に保存された検体
  - 十分に乾燥されていない検体
  - 検体量・保存輸送方法が条件にみえない場合
- 検体の返却は承っておりません。