

IDEXX ベットラボステーションバージョン5.06アップグレードのご案内

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをご紹介します：

- 今後の製品や機能をサポートするため、IDEXX VetLab*ステーションシステムが機能強化されました。
- セキュリティー、信頼性、安定性の向上。

システムのアップグレード

重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

IDEXX SmartService* ソリューション経由でソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」を押します。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「**機器操作**」をタップし、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップします。

USB ドライブ経由でソフトウェアをアップグレードするには：

1. このデータをバックアップします（「**機器操作**」を押し、「**データのバックアップ**」を押してから、画面上の指示に従います）。
2. 「**機器操作**」画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」を押してから、画面上の指示に従います。
3. アップグレードが完了したら、メディアラベルに印刷されているソフトウェアのバージョンが「**機器操作**」画面のバージョンと一致することを確認します。

IDEXXカスタマーサービス部テクニカルサポート

0120-71-4921