

# IDEXXベットラボ\*ステーションをソフトウェアバージョン5.10にアップグレードしてください

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをいくつかご紹介します。

- IDEXX ケミストリープラットフォームのパフォーマンスと信頼性をサポートすることを目的とした、IDEXX ベットラボ\*ステーションシステムのアップデート。
- 自動血球計数装置 IDEXX プロサイト Dxの新機能として、結果解釈サポートコメントが表示されます。独自のアルゴリズムを用いてCBCの結果に見られるパターンを検出し、コメントを表示、ドットプロットと合わせて確認することで診断にお役立ていただけます。(動物用一般医療機器 | 血球計数装置)
- 翻訳およびローカライゼーションの継続的向上。
- 複数の拡張機能により安全性、信頼性、安定性を向上。

## システムのアップグレード

### 重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

### IDEXX SmartService\*ソリューションでソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」をタップします。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「**機器**」、「**ソフトウェアのアップグレード**」の順にタップします。

### USBドライブでソフトウェアをアップグレードするには：

1. データをバックアップします（「**機器**」をタップし、「**データ バックアップ**」をタップして、画面上の指示に従ってください）。
2. 機器操作画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップし、画面上の指示に従ってください。
3. アップグレードが完了したら、メディアラベルに記載されたソフトウェアバージョンと機器操作画面のバージョンが一致していることを確認してください。

### IDEXXテクニカルサポート

0120-71-4921 音声ダイヤル1番