

IDEXX ベットラボステーション(IDEXX VetLab* Station) をソフトウェアバージョン **5.21** にアップグレードしてください

本書では、このリリースに含まれている拡張機能とサービスをいくつかご紹介します。

- 複数の拡張機能により安全性、信頼性、安定性を向上。

システムのアップグレード

重要：

- アップグレードが完了するまで、システムを中断したり、シャットダウンしたりしないでください。
- なるべく早めにソフトウェアをアップグレードして、新機能の使用を開始してください。

IDEXX スマートサービス(IDEXX SmartService* Solutions)ソリューションでソフトウェアをアップグレードするには：

画面に指示が表示されたら、「**今すぐ更新**」をタップします。「ソフトウェアの更新成功」メッセージが表示されたら、アップグレードは完了です。

または

ホーム画面で「**機器**」、「**ソフトウェアのアップグレード**」の順にタップします。

USB ドライブでソフトウェアをアップグレードするには：

- 1.データをバックアップします（「**機器**」をタップし、「**データバックアップ**」をタップして、画面上の指示に従ってください）。
- 2.機器操作画面で、「**ソフトウェアのアップグレード**」をタップし、画面上の指示に従ってください。
- 3.アップグレードが完了したら、メディアラベルに記載されたソフトウェアバージョンと機器操作画面のバージョンが一致していることを確認してください。

IDEXX テクニカルサポート

0120-71-4921 音声ダイヤル 1 番